

Was ist im Lieferumfang enthalten?



Falls etwas fehlen sollte oder falls Sie irgendwelche Schwierigkeiten haben, wenden Sie sich an unseren auf der Rückseite Ihres Lightwriters angegebenen Kundendienst.

Toby Churchill Ltd reserves the right to make reasonable changes or modifications to the products, materials and services at any time without notice.

Wichtige Informationen

- Ihr Lightwriter® sollte über Nacht aufgeladen werden, damit Sie ihn am nächsten Tag in vollem Umfang nutzen können.
- Ihr Lightwriter® schaltet in den Bereitschaftsmodus (Standby) um, wenn Sie ihn eine Zeit lang nicht nutzen. Sie können ihn durch Drücken auf **On** wieder aktivieren und dort weitermachen, wo Sie aufgehört haben.
- Gegebenenfalls ist Ihr Lightwriter® an beiden Displays mit einer Schutzfolie ausgestattet. Bitte entfernen Sie diese, bevor Sie Ihren Lightwriter® nutzen.

Weitere Informationen über Ihren Lightwriter® finden Sie in der Bedienungsanleitung.

www.toby-churchill.com

START401DE

TOBY!CHURCHILL

Lightwriter® SL40 Series

Erste Schritte



LIGHT!WRITER®

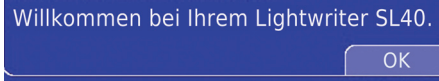
Schritt 1: Ihren Lightwriter® laden

- Vor der Verwendung Ihres Lightwriters® müssen Sie das Ladegerät anschließen.
- Sie können Ihren Lightwriter® auch während des Ladevorgangs nutzen.
- Ihr Lightwriter® muss mindestens 12 Stunden an das Ladegerät angeschlossen sein, bis die Batterie vollständig geladen ist.



Leuchtet eine grüne Lampe am Lightwriter®? Wenn nicht, müssen Sie sicherstellen, dass das Ladegerät sowohl an der Steckdose als auch am Lightwriter® angeschlossen ist.

Schritt 2: Ihren Lightwriter® anschließen

- Um Ihren Lightwriter® einzuschalten, drücken Sie auf **On/C**
- Bitte warten Sie einen Moment, bis Ihr Lightwriter® hochgefahren ist. Nachdem er gestartet ist, erscheint der folgende Bildschirm.
- Der Lightwriter® wird Ihnen einige Fragen stellen. Folgen Sie einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm. Verwenden Sie die Tasten **Weiter** und **Zurück**, um eine Option auszuwählen, und bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit der Taste **OK**.



*Nach Drücken auf Umschalten und anschließend OK hören Sie eine Bestätigung für jede Einstellung. Weitere Unterstützung erhalten Sie nach Drücken auf **Umschalten** und **Hilfe**.*

Schritt 3: Verwendung Ihres Lightwriters®

- Nachdem Sie das Datum eingestellt haben, erscheint im Bildschirm des Lightwriters® die Werkzeugleiste „Aktivitäten“.



Die einzelnen Symbole stehen repräsentativ für die Optionen, die Sie mit Ihrem Lightwriter® nutzen können.

-  Die erste Aktivität ist bereits markiert, und Ihr Lightwriter® ist bereit für die Kommunikation.
- Drücken Sie auf  und beginnen Sie zu tippen und zu sprechen.
-  Nach Betätigen dieser Taste gelangen Sie immer zurück auf die Werkzeugleiste „Aktivitäten“.