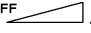


BIGmack



Bedienungsanleitung

Inhalt

Der BIGmack im Überblick.....	3
Aufnahme.....	4
Wiedergabe.....	4
Lautstärke.....	4
Ansteuerung durch externe Taste.....	4
Den BIGmack für die Benutzung vorbereiten.....	5
Batterie einsetzen.....	5
Eine Aussage aufnehmen.....	6
Eine gespeicherte Aussage wiedergeben.....	6
Zusätzlich zur Sprachausgabe eine Aktivität auslösen.....	7
Nutzung der Schaltoption zur kurzzeitigen Aktivierung des Gerätes / Spielzeugs.....	7
Nutzung der Schaltoption zur Aktivierung des Geräts / Spielzeugs für eine bestimmte Zeit oder zum wechselseitigen Ein-/Ausschalten.....	8
Netzbetriebene Geräte schalten.....	9
Bedienelemente & Anschlüsse.....	10
Ein-/Ausschalter 	10
Externe Taste anschließen.....	10
Montage.....	10
Transport.....	10
Pflege und Aufbewahrung.....	10
Problembhebung.....	11

Hinweis

Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben in dieser Bedienungsanleitung erfolgen ohne Gewähr und können ohne vorherige Ankündigungen geändert werden. AbleNet geht damit keinerlei Verpflichtung ein. Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der AbleNet Inc. sind die vollständige oder teilweise Fotokopie und Reproduktion dieser Bedienungsanleitung sowie die Übersetzung in andere Sprachen nicht zulässig.

Die -Kennzeichnung des *BIGmacks* erfolgt gemäß der Richtlinie 93/42 EWG.



Mischen Sie dieses Produkt, wenn Sie es entsorgen wollen, nicht mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen. Es gibt ein getrenntes Sammelsystem für gebrauchte elektronische Produkte, über das die richtige Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung gemäß der bestehenden Gesetzgebung gewährleistet wird. Privathaushalte in den 25 Mitgliedsstaaten der EU, in der Schweiz und in Norwegen können ihre gebrauchten elektronischen Produkte an vorgesehenen Sammeleinrichtungen kostenfrei zurückgeben oder aber an den Händler zurückgeben, von dem sie es erworben haben.

Der BIGmack im Überblick

Der BIGmack wurde entwickelt, um den Wünschen nach einer einfachen Kommunikationshilfe mit Sprachausgabe nachzukommen. Er ist geeignet für:

- das Erlernen, wie man eine Taste benutzt;
- das Erlernen, wie man Sprache gezielt einsetzt, um Bedürfnisse zu äußern;
- das Erlangen von Aufmerksamkeit;
- alle Situationen, in denen eine einzelne Aussage sinnvoll eingesetzt werden kann;
- das Kombinieren von Sprachausgabe und dem Auslösen einer Aktivität.


Einige Beispiele für den Einsatz von BIGmack sind:


- Begrüßung / Verabschiedung von Freunden und Verwandten;
- um Hilfe bitten;
- ein Haustier rufen;
- in einer Geschichte / Lied ein sich wiederholendes Wort sagen.



Aufnahme

Der BIGmack verfügt über einen Speicher von 75 Sekunden.

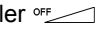

1. Schalten Sie den BIGmack ein durch Drehen des Lautstärkereglers nach rechts.
2. Drücken Sie den Knopf „RECORD“  und die große bunte Auslösetaste und halten Sie beide fest. Die Aufnahme „läuft“ jetzt (zu erkennen an der blinkenden roten Aufnahme-LED).
3. Sprechen Sie die Aussage, die Sie aufnehmen wollen. Das Mikrofon befindet sich oben in der Mitte über der großen bunten Auslösetaste. Sprechen Sie in einer Entfernung von ca. 25 - 30 cm und in Richtung des Mikrofons, wenn Sie eine Aussage aufnehmen.
4. Lassen Sie die große bunte Auslösetaste los, sobald Sie die Aussage zu Ende gesprochen haben.

Tipp: Schließen Sie während der Aufnahme eine externe Taste an die Buchse  „SWITCH“ an, die Sie an Stelle der großen Taste zum Aufnehmen betätigen. Dies verhindert das sonst am Anfang und am Ende jeder Aufnahme zu hörende Klickgeräusch.


Wiedergabe

Zum Abrufen der im BIGmack gespeicherten Aussage ist einfach die große bunte BIGmack-Taste zu drücken. Ein einziges Auslösen der Taste reicht, um die gesamte Aussage abzurufen. Um die Aussage zu wiederholen, drücken Sie die Taste erneut, nachdem die Aussage gesprochen wurde.

Lautstärke

Wählen Sie die Lautstärke passend zur Stärke der Umgebungsgeräusche. Drehen Sie den Lautstärkereglер  nach links, um die Lautstärke zu verringern. Drehen Sie den Lautstärkereglер  nach rechts, um die Lautstärke zu erhöhen.

Ansteuerung durch externe Taste

Sollte der Benutzer / die Benutzerin des BIGmacks die eingebaute Taste nicht betätigen können, so kann eine geeignete Einertaste mit 3,5 mm-Klinkenstecker an die Buchse „SWITCH“  des BIGmacks angeschlossen werden. Sobald die externe Taste aktiviert wird, gibt der BIGmack die gespeicherte Aussage wieder.

Den BIGmack für die Benutzung vorbereiten

Batterie einsetzen

Öffnen Sie das Batteriefach in der Unterseite des BIGmacks. Legen Sie eine Batterie (9V-Block) richtig gepolt ein. Schließen Sie die Klappe wieder.

Hinweis: vom Gebrauch wiederaufladbarer Batterien (Akkus) wird abgeraten!





Batteriefach




Eine Aussage aufnehmen

Sie können beliebige Aussagen in einer Länge von maximal 75 Sekunden (ca. 75-100 Wörter) aufnehmen. Dauert die Aussage länger als 75 Sekunden, löscht der BIGmack automatisch den Anfang der Aussage, d.h., Sie haben immer die letzten 75 Sekunden der Aussage gespeichert. Wenn Sie unsicher sind, wie lange die Aussage ist, stoppen Sie die Zeit, bevor Sie aufnehmen.

Das tun Sie	Das passiert	Hinweis
Drücken Sie gleichzeitig die kleine „RECORD“-Taste  auf der Rückseite und die eigentliche BIGmack-Taste. Halten Sie beide Tasten gedrückt während Sie aufnehmen.	Der Aufnahmechip des BIGmacks wird aktiviert.	Die LED über der „RECORD“-Taste blinkt rot.
Sprechen Sie die Aussage in das eingebaute Mikrofon. Halten Sie einen Abstand von ca. 20 – 25 cm.	Die Aussage wird aufgenommen.	Sprechen Sie in Richtung des eingebauten Mikrofons. Sie haben insgesamt 75 Sekunden Zeit, das entspricht ca. 75 - 100 Wörtern.
Lassen Sie die „RECORD“-Taste  und die BIGmack-Taste los, sobald Sie die Aussage zuende gesprochen haben.	Die Aufnahme der Aussage wird beendet.	
Drücken Sie kurz die BIGmack-Taste.	Die Aussage wird gesprochen.	Die LED über der „RECORD“-Taste blinkt einmal gelb auf.

Eine gespeicherte Aussage wiedergeben

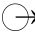
Auf folgende Weise kann der BIGmack aktiviert werden, um die gespeicherte Aussage wiederzugeben:

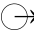
Das tun Sie	Das passiert	Hinweis
Drücken Sie kurz die BIGmack-Taste.	Die Aussage wird gesprochen.	Der BIGmack setzt sich für die nächste Wiedergabe automatisch zurück.
Drücken Sie die BIGmack-Taste und halten Sie sie fest.	Die Aussage wird gesprochen.	Die BIGmack-Taste muss losgelassen werden, bevor die Aussage ein weiteres Mal abgerufen werden kann.
Drücken Sie die BIGmack-Taste mehrere Male schnell hintereinander.	Die Aussage wird gesprochen.	Die Aussage wird nur dann wiederholt gesprochen, wenn die BIGmack-Taste erst gedrückt wird, nachdem die Aussage vollständig gesprochen wurde.
Schließen Sie eine externe Taste an die Buchse „SWITCH“  an und betätigen Sie diese.	Die Aussage wird gesprochen.	An den BIGmack lassen sich alle Tasten mit 3,5 mm-Klinkenstecker anschließen.

Zusätzlich zur Sprachausgabe eine Aktivität auslösen

Die Schalloption des BIGmacks ermöglicht es, das Abrufen der Aussage mit einer weiteren Aktivität zu verbinden. Dabei kann es sich um ein batteriebetriebenes Spielzeug oder beliebige andere Geräte handeln, die sich mit einer Taste steuern lassen. Soll die Schalloption genutzt werden, so muss der BIGmack mittels des mitgelieferten Verbindungskabels mit dem Gerät/Spielzeug – ggf. über die als Zubehör lieferbaren Adapter Batterieunterbrecher, Switch Latch & Timer oder PowerLink-Netzschaltadapter – verbunden werden.

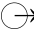
Nutzung der Schalloption zur kurzzeitigen Aktivierung des Gerätes / Spielzeugs

Schließen Sie das Verbindungskabel an die Buchse  „TOY/APPL.“ sowie an das zu steuernde Gerät / Spielzeug z.B. über einen Batterieunterbrecher an. Das zu steuernde Gerät / Spielzeug wird vom BIGmack für die Dauer der Aussage eingeschaltet.

Das tun Sie	Das passiert	Hinweis
Zum Aktivieren eines batteriebetriebenen Gerätes / Spielzeugs legen Sie das kupferne Ende des Batterieunterbrechers zwischen eine Batterie und den Batteriekontakt des Geräts / Spielzeugs. Schalten Sie das Gerät/Spielzeug ein.		Machen Sie mit einem scharfen Messer evtl. eine kleine Kerbe in den Batteriefachdeckel, damit beim Schließen des Batterieunterbrechers das Kabel des Batterieunterbrechers nicht abgeklemmt und damit beschädigt wird.
Schließen Sie das Verbindungskabel an die Buchse  „TOY/APPL.“ des BIGmacks sowie an den Batterieunterbrecher an.		Das Verbindungskabel wird mit dem BIGmack geliefert.
Betätigen Sie den BIGmack über die eingebaute oder eine extern angeschlossene Taste.	Für die Dauer der im BIGmack gespeicherten Aussage wird das Gerät / Spielzeug aktiviert.	Siehe auch „Eine gespeicherte Aussage wiedergeben“ oder „Externe Tasten benutzen“.

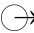
Nutzung der Schaltoption zur Aktivierung des Geräts / Spielzeugs für eine bestimmte Zeit oder zum wechselseitigen Ein-/Ausschalten

Wollen Sie das Gerät / Spielzeug unabhängig von der Länge der im BIGmack gespeicherten Aussage für einen bestimmten Zeitraum oder unbegrenzt einschalten, so benötigen Sie zusätzlich eine der AbleNet-Zeitschaltuhren Switch Latch & Timer, die zwischen BIGmack und den Batterieunterbrecher geschaltet werden muss.

Das tun Sie	Das passiert	Hinweis
<p>Bereiten Sie den Switch Latch & Timer für die Benutzung vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schließen Sie den Switch Latch & Timer mit Hilfe eines Batterieunterbrechers an das zu steuernde Gerät / Spielzeug an • Schalten Sie das Gerät / Spielzeug ein. • Stellen Sie den Switch Latch & Timer auf die gewünschte Betriebsart ein 		<p>Beachten Sie ggf. die Bedienungsanleitung des Switch Latch & Timers.</p> <p>Befestigen Sie den Einschalter des Spielzeugs ggf. mittels Klebeband, so dass er dauerhaft in der Position „Ein“ verbleibt.</p>
<p>Schließen Sie das Verbindungskabel an die Buchse  „TOY/APPL.“ des BIGmacks sowie an den Switch Latch & Timer an.</p>		
<p>Betätigen Sie den BIGmack über die eingebaute oder eine extern angeschlossene Taste.</p>	<p>Das Gerät / Spielzeug wird entsprechend der gewählten Betriebsart des Switch Latch & Timers aktiviert.</p>	<p>Siehe auch „Eine gespeicherte Aussage wiedergeben“ oder „Externe Tasten benutzen“.</p>

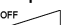
Netzbetriebene Geräte schalten

Wollen Sie ein netzbetriebenes Gerät oder ein Gerät mit angeschlossenem Steckernetzteil mit dem BIGmack schalten, so benötigen Sie zusätzlich zum BIGmack einen Netzschaltadapter wie z. B. den PowerLink.


Das tun Sie	Das passiert	Hinweis
Bereiten Sie den PowerLink für die Benutzung vor: <ul style="list-style-type: none">• Schließen Sie den PowerLink an eine Steckdose an• Schließen Sie das zu steuernde Gerät an den PowerLink an• Schalten Sie das Gerät ein.• Stellen Sie den PowerLink auf die gewünschte Betriebsart ein		Beachten Sie ggf. die Bedienungsanleitung des PowerLinks Befestigen Sie den Einschalter des Gerätes ggf. mittels Klebeband, so dass er dauerhaft in der Position „Ein“ verbleibt.
Schließen Sie das Verbindungskabel an die Buchse  „TOY/APPL.“ des BIGmacks sowie an die Eingangsbuchse des PowerLinks an.		
Betätigen Sie den BIGmack über die eingebaute oder eine extern angeschlossene Taste.	Das Gerät wird entsprechend der gewählten Betriebsart des PowerLinks aktiviert.	Siehe auch „Eine gespeicherte Aussage wiedergeben“ oder „Externe Tasten benutzen“.

Bedienelemente & Anschlüsse

Ein-/Ausschalter

Der BIGmack hat einen Ein- / Ausschalter, mit dem er z. B. während eines Transportes vollständig ausgeschaltet werden kann. Drehen Sie dazu den Lautstärkereglern  in Richtung kleinerer Lautstärken, bis Sie ein deutliches Klicken hören. Der BIGmack ist nun ausgeschaltet und kann nicht aktiviert werden.

Externe Taste anschließen

An die Buchse  „SWITCH“ kann eine beliebige Taste mit einem 3,5mm-Klinkenstecker angeschlossen werden. Der Benutzer kann den BIGmack dann entweder über die eingebaute Großtaste oder die externe Taste aktivieren.

Montage

BIGmack hat 3 Gewindebuchsen im Boden für das Befestigen auf der großen dreieckigen AbleNet-Befestigungsplatte (Zubehör), die mit dem Halterungssystem „Universelles Schalter-Montage-System“ (USMS) verwendet werden kann. Alternativ können Sie den BIGmack auch mit Klettband oder mittels UltraStick wiederlösbar auf ebenen Oberfläche befestigen. Die genannten Befestigungssysteme sind als Zubehör erhältlich.



Transport

Für den BIGmack ist ein als Zubehör angebotener Trageriemen (BM-TS) erhältlich .

Pflege und Aufbewahrung


Mit nur wenig Pflege und Wartung wird Ihr BIGmack Ihnen über Jahre gute Dienste leisten. Eine gespeicherte Aussage bleibt solange im Gerät erhalten, bis eine neue aufgenommen wird – selbstverständlich auch, wenn der BIGmack ausgeschaltet wird. Bei Verwendung einer guten Batterie (Alkalibatterie) können Sie die gespeicherte Aussage viele hundert Male wiedergeben.

Hinweis: vom Gebrauch wiederaufladbarer Batterien (Akkus) wird abgeraten!

Falls der BIGmack schmutzig geworden ist, wischen Sie ihn mit einem feuchten Tuch oder ein wenig Seifenwasser ab. In der Nähe der Buchsen und des Lautsprechers sollte kein Wasser verwendet werden. **Das Gerät niemals in Wasser eintauchen!**

Problembesehung

Bei technischen Problemen schauen Sie bitte zuerst in dieser Liste nach. Sollte sich der Fehler nicht beheben lassen, rufen Sie Ihren Handler an.

Problem	Losung
BIGmack spricht nicht.	<ol style="list-style-type: none">1. Versichern Sie sich, dass der BIGmack eingeschaltet ist.2. Versichern Sie sich, dass die Batterie frisch ist und richtig eingelegt wurde.3. Stellen Sie sicher, dass eine Aussage aufgesprochen wurde.4. Stellen Sie die Lautstarke auf Maximum.5. Bei Verwendung einer externen Taste prufen Sie, ob diese einwandfrei arbeitet.6. Bei Verwendung einer externen Taste prufen Sie, ob diese an die richtige Buchse des BIGmacks angeschlossen ist.7. Bei Verwendung eines externen Lautsprechers prufen Sie, ob dieser einwandfrei arbeitet.
BIGmack macht Gerausche, aber spricht nicht, was aufgenommen wurde.	Wiederholen Sie die Aufnahme der Botschaft. Wenn die Aussage auch danach nicht richtig wiedergegeben wird, entfernen Sie fur ca. 5 Sekunden die Batterie aus dem BIGmack.
Nur ein Teil der Aufnahme ist gespeichert.	Die Aufnahme war langer als 75 Sekunden. Nehmen Sie die Aussage neu auf und stellen Sie sicher, dass Sie die „RECORD“-Taste  und die groe bunte Auslosetaste wahrend der gesamten Aufnahme festhalten.
Sprachausgabequalitat ist gestort.	Setzen Sie eine neue Batterie ein.
Sprachausgabe ist stark verlangsamt.	Setzen Sie eine neue Batterie ein.
Die Aussage wird wiederholt gesprochen, ohne dass die Taste gedruckt wird.	Setzen Sie eine neue Batterie ein.

Garantie

AbleNet gibt Ihnen auf dieses Produkt 12 Monate Garantie. Von der Garantie ausgenommen sind Schaden auf Grund unsachgemaer Benutzung.