



Anleitung iTalk₂



Der **iTalk₂** ist eine einführende Kommunikationshilfe mit Sprachausgabe mit folgenden Eigenschaften:

- 2 Mitteilungen à 10 Sekunden
- einfache Bedienung
- leicht zu besprechen
- 2 große runde Auslösetasten Ø 6,25 cm
- 2 Ausgänge zum Aktivieren von Spielzeug
- einstellbare Lautstärke
- Ein-/Aus-Schalter
- inkl. 2 Tastenkappen zum Gestalten der Tasten mit Symbolen
- Betrieb mit 9V-Batterie


Das Wichtigste in der Übersicht Um eine Mitteilung aufzunehmen

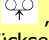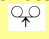1. Schalten Sie den iTalk₂ ein.
2. Drücken Sie die Taste  „RECORD“ (Aufnahme) auf der Rückseite des iTalk₂ und halten Sie sie fest.
3. Drücken und Halten Sie diejenige der beiden großen bunten Tasten, unter der Sie die Mitteilung speichern wollen. Die rote LED beginnt zu leuchten und zeigt an, dass die Aufnahme läuft.
4. Sprechen Sie die Mitteilung in das Mikrofon. Das Mikrofon befindet sich hinter dem Lautsprechergrill.
5. Lassen Sie die große Taste los. Die rote LED erlischt. Lassen Sie die Taste  „RECORD“ (Aufnahme) los.
6. Wiederholen Sie Schritt 2. - 5., um die andere Taste zu besprechen oder eine Aufnahme zu wiederholen.


Um eine Mitteilung wiederzugeben

Drücken Sie die entsprechende Taste. Die Mitteilung wird wiedergegeben.

Um die Lautstärke zu ändern

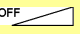Drehen Sie den Lautstärkeregler  nach rechts, um die Lautstärke zu erhöhen. Drehen Sie den Lautstärkeregler nach links in Richtung OFF, um die Lautstärke zu reduzieren.


Um den iTalk₂ auszuschalten

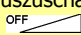Um den iTalk₂ auszuschalten, drehen Sie den Lautstärkeregler  soweit nach links in Richtung OFF, bis Sie ein Klicken hören.

Batterie einsetzen

Der iTalk₂ benötigt eine handelsübliche 9V-Batterie. Wir empfehlen die Verwendung von Alkali-Batterien, von der Verwendung wiederaufladbarer 9V-Batterien wird abgeraten. Zum Einsetzen der Batterie drehen Sie den iTalk₂ um, entfernen Sie ggf. die Bodenplatte, öff-

nen Sie das Batteriefach auf der Unterseite und schließen Sie die Batterie an den Clip an.

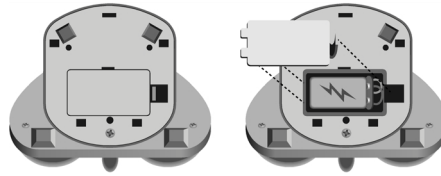

Schließen Sie das Batteriefach anschließend wieder.


Tastensymbole

Um dem Benutzer einen Hinweis auf die unter einer Taste gespeicherte Aufnahme zu geben, können die beiden Tasten mit Symbolen belegt werden. Zwei dazu benötigte Tastenkappen werden mitgeliefert. Heben Sie die Tastenkappe ab, um ein Symbol, Bild oder Foto auf die Taste zu legen. Setzen Sie die Tastenkappe anschließend wieder auf.

Ablagefach für Tastensymbole


Nicht benötigte Tastensymbole können in dem ausziehbaren Plastikfach im iTalk₂ gelagert werden.

Ablage

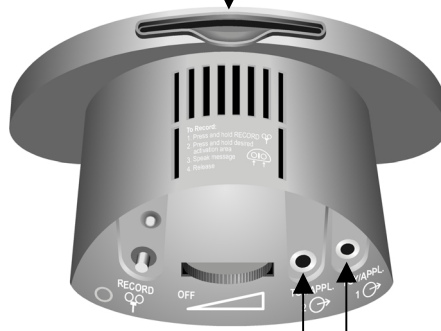

Schaltausgänge


Steuerausgänge für externe Geräte

Der iTalk₂ bietet die Möglichkeit, parallel zur Sprachausgabe externe Geräte zu aktivieren. Der Effekt der Sprachausgabe bei Aktivierung einer Taste kann dadurch verstärkt werden. Jede der beiden im iTalk₂ vorhandenen Tasten verfügt dazu über einen Schaltausgang . Solange eine Mitteilung wiedergegeben wird, ist der entsprechende Schaltausgang geschlossen und ein extern angeschlossenes Gerät oder Spielzeug wird aktiviert.

Externe Geräte anschließen

Um einen Steuerausgang des iTalk₂ nutzen zu können, müssen sie ein entsprechend modifiziertes Gerät/Spielzeug haben. Handelt es sich um ein batteriebetriebenes Spielzeug oder Gerät (Radio, Kassettenrecorder), so muss es durch einen Batterieunterbrecher zur Steuerung über eine externe Taste/Gerät adaptiert und selber permanent eingeschaltet sein. Wollen Sie ein netzbetriebenes Gerät mit dem iTalk₂ steuern, so benötigen Sie einen Power-Link-Netzschaltadapter. Schließen Sie die zu steuernden Geräte mittels der mitgelieferten Verbindungskabel an den iTalk₂ an. Ausgang **1**  gehört zur **roten**, Ausgang **2**  zur **gelben Taste**. Stellen Sie sicher, dass das angeschlossene Gerät eingeschaltet ist und betätigen Sie die zum Gerät gehörende Taste. Das Gerät sollte für die Dauer der Sprachausgabe aktiv werden.

Befestigung der Bodenplatte

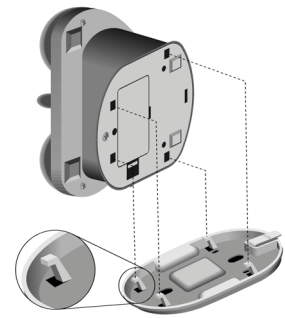

Den iTalk₂ auf der Bodenplatte befestigen:


1. Legen Sie den iTalk₂ so auf die Bodenplatte, dass die 4 Zapfen der Bodenplatte in die entsprechenden Öffnungen des iTalk₂ passen.
2. Schieben Sie den iTalk₂ in Richtung der Entriegelungslasche, bis er mit einem hörbaren Klicken einrastet.

Den iTalk₂ von der Bodenplatte entfernen:

1. Drücken Sie die Entriegelungslasche des iTalk₂ leicht nach unten.
2. Schieben Sie den iTalk₂ ein kleines Stück von der Entriegelungslasche weg und heben Sie ihn dann ab.

Befestigung an USMS


Sie können den iTalk₂ mit Hilfe der Bodenplatte und einer kleinen dreieckigen Befestigungsplatte an einem unserer Halterungsarme (z.B. Universelles Schalter-Montage-System) befestigen.

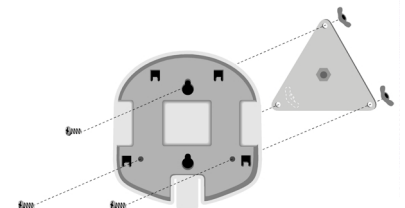

Verbinden Sie dazu die Bodenplatte mittels Schrauben und Flügelmutter mit der Befestigungsplatte und befestigen Sie diese am Halterungsarm.


Wandbefestigung

Sie können den iTalk₂ mit Hilfe der Bodenplatte auch an der Wand befestigen. Zur wiederlösbaren Wandbefestigung benutzen Sie die mittleren, großen Löcher mit 2 Schrauben (Abb. rechts), zur permanenten drei Schrauben (Abb. links)

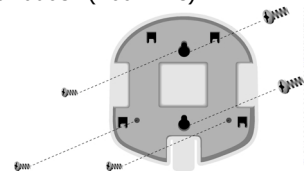

Garantie

AbleNet gibt Ihnen auf dieses Produkt 12 Monate Garantie. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden auf Grund unsachgemäßer Benutzung.

 Mischen Sie dieses Produkt, wenn Sie es entsorgen wollen, nicht mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen. Privathaushalte können ihre gebrauchten elektronischen Produkte an vorgesehenen Sammelrichtungen kostenfrei zurückgeben oder aber an den Händler zurückgeben, von dem sie es erworben haben.