



## Kurzanleitung: iTalk2™ Kommunikationshilfe mit Ebenen

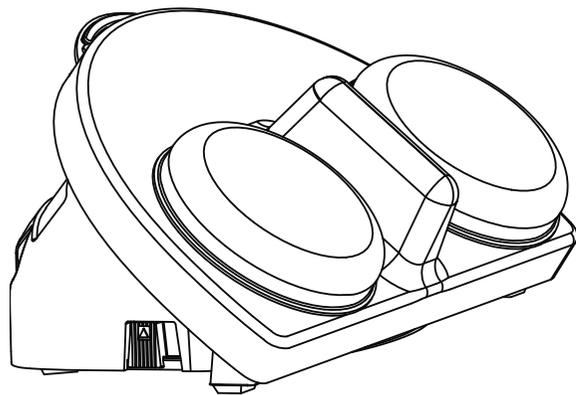

www.ablenetinc.com


### 1 Batterien einlegen und einschalten

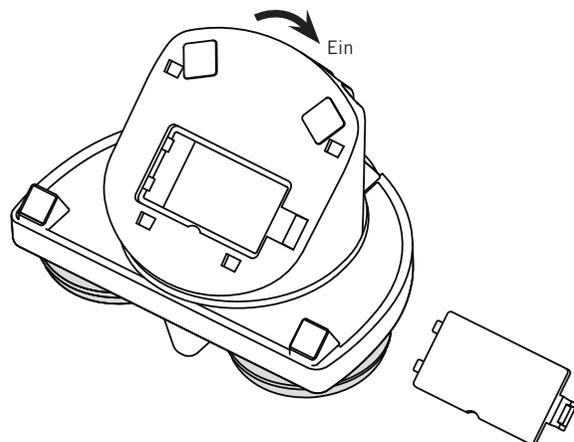

An der Unterseite des Gerätes eine 9-Volt-Batterie einlegen. Zum Einschalten des Gerätes den Lautstärkereglern drehen.

Zum Wechseln der Batterie muss die Montageplatte des iTalk2 abgenommen werden. Dazu die Sperrlasche drücken und die Montageplatte abziehen.

### 2 Die Ebene wählen und in den Aufnahme-Modus umschalten

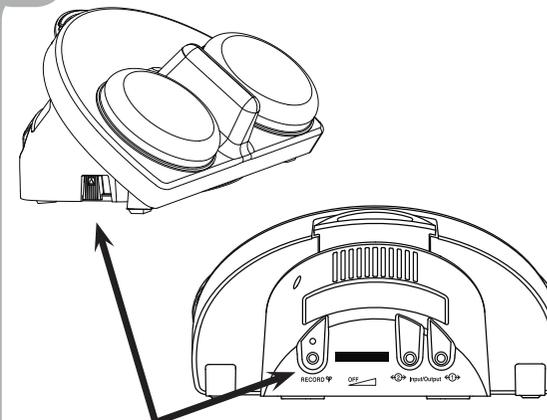


Drücken und auswählen

Den AUFNAHME-Knopf gedrückt halten, bis die RECORD-Lampe leuchtet. Dann loslassen.

Über den Level-Schalter (an der Seite des Gerätes) die gewünschte Ebene auswählen.

### 3 Die Sprachmitteilungen aufzeichnen

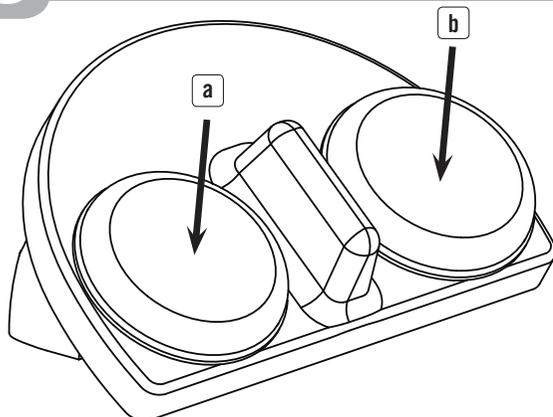


a. Die Tasteroberfläche gedrückt halten und beim Erönen des Tonsignals zu sprechen beginnen. Am Ende der Aufzeichnung loslassen.

b. Dasselbe mit dem zweiten Taster wiederholen.

c. In die nächste Ebene wechseln und die obigen Schrittwiederholen, um weitere Ebenen aufzuzeichnen.

Während der Aufnahme blinkt die RECORD-Lampe.

### 4 Den Aufnahme-Modus beenden

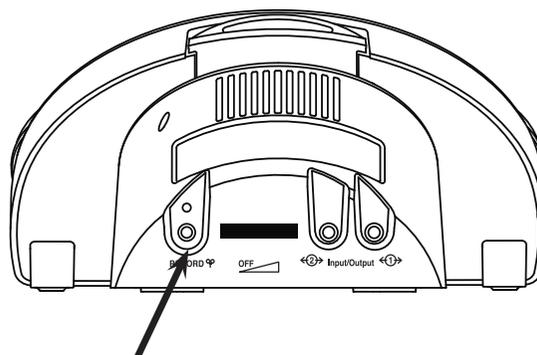


Drücken und loslassen

Den Aufnahme Knopf drücken und loslassen, um den Aufnahme-Modus zu beenden.


*HINWEIS: Dieses Gerät verfügt über insgesamt 4 Minuten Aufnahmezeit. Wenn nur noch 10 Sekunden verbleiben, blinkt die Lampe gelb.*

### 5 Die Aufzeichnungen wiedergeben

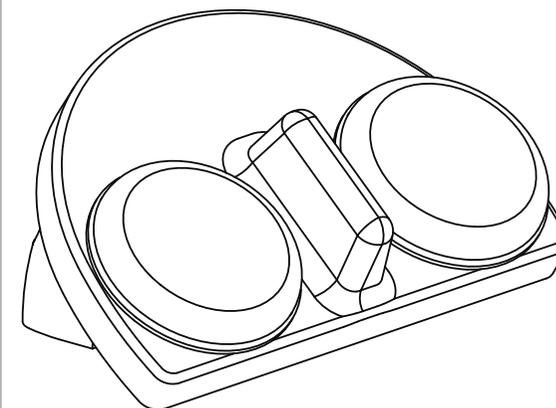

Damit ist der iTalk2 einsatzbereit.

## Erweiterte Funktionen

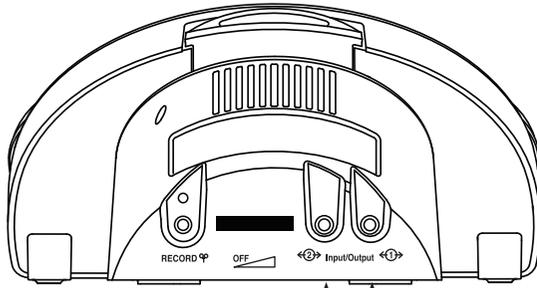

Gelb – Eingang/Ausgang Buchse 2

Rot – Eingang/Ausgang Buchse 1

### Steuerung von Spielzeug oder anderen Geräten

Über die Ein- und Ausgangsbuchsen des iTalk2 können für den Taster adaptierte Spielzeuge oder Geräte aktiviert werden.

1. Ein adaptiertes Spielzeug oder Gerät in eine oder in beide Ein-/Ausgangsbuchsen einstecken.
2. An der/den entsprechenden Stelle/n eine Mitteilung aufzeichnen.  
*HINWEIS: Der rote Taster aktiviert die Buchse 1, der gelbe Taster aktiviert die Buchse 2.*
3. Beim Drücken der Tasteroberfläche wird die aufgenommene Mitteilung wiedergegeben und das angeschlossene Spielzeug oder Gerät wird für die Dauer der gespeicherten Aufzeichnung aktiviert.

*HINWEIS: Für die Steuerung eines Elektrogerätes muss ein PowerLink® 3-Adapter verwendet werden. Informationen über die Anpassung von Spielzeug und Elektrogeräten finden Sie auf unserer Website [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)*


### Wiedergabe einer Sprachmitteilung über einen externen Taster

Die Ein-/Ausgangsbuchsen des iTalk2 kehren automatisch auf die obigen Standardeinstellungen zurück. Verwendung eines oder mehrerer externer Taster mit dem iTalk2:

1. Das Gerät ausschalten.
2. Den oder die gewünschten Taster mit 3,5 mm (1/8-Zoll)-Steckern in eine oder in beide Ein-/Ausgangsbuchsen einstecken.
3. Den oder die externen Schalter gedrückt halten und gleichzeitig den iTalk2 einschalten.

*Bei Verwendung von externen Schaltern ist die Spielzeug/Geräte-Funktion (Toy/Appliance) deaktiviert. Um zur Spielzeug/Geräte-Funktion zurückzukehren, muss das Gerät aus- und wieder eingeschaltet werden.*

## Verwendung von Bildern und Symbolen

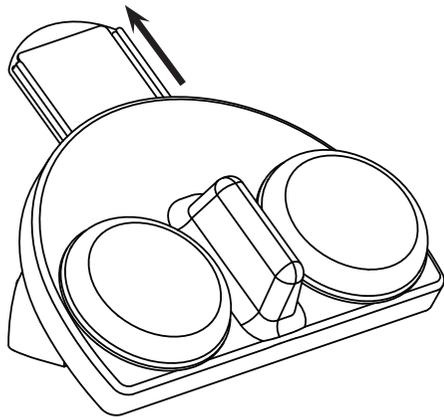

Im Lieferumfang des iTalk2 sind zwei Tasterkappen enthalten. Diese transparenten Kunststoffdeckel können zum Festhalten von Bildern oder Symbolen auf der Tasteroberfläche verwendet werden.

iTalk2 enthält außerdem einen integrierten Symbolhalter oben auf dem Gerät. Der Kunststoffdeckel wird vom Gerät weggezogen und zum Befestigen von bis zu 5 x 5 cm großen Bildern oder Symbolen wieder aufgedrückt.

## Montageoptionen

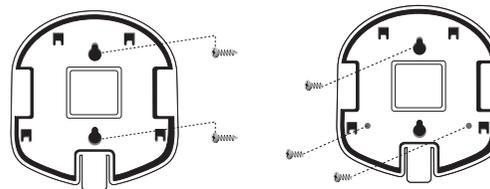


Abb. A

Abb. B

### Der iTalk2 umfasst eine leicht zu verwendende Montageplatte.

Die Montageplatte durch Drücken der Sperrlasche lösen und nach hinten vom Gerät abziehen.


Zum Anbringen der Montageplatte die vier Stifte der Montageplatte auf die dazugehörigen Löcher im iTalk2 ausrichten. Die Montageplatte vorschieben, bis sie mit einem Klicken einrastet.

Für die kurzzeitige Befestigung kann eine Flachkopfschraube (Gr. 8) mit den zwei senkrechten Schlitzen in der Montageplatte verwendet werden. (Abbildung A)


Zur permanenten Befestigung die Montageplatte durch die drei Löcher (links abgebildet) hindurch festschrauben. (Abbildung B)

*Weitere Montageoptionen finden Sie auf [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).*


## Produktabbildung und Garantie

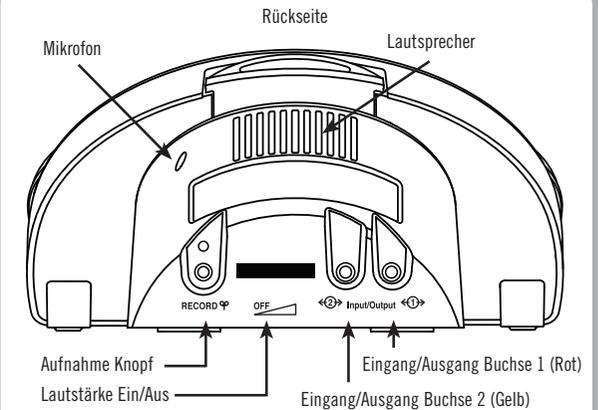

Mikrofon  
Rückseite  
Lautsprecher  
Aufnahme Knopf  
Lautstärke Ein/Aus  
Eingang/Ausgang Buchse 1 (Rot)  
Eingang/Ausgang Buchse 2 (Gelb)

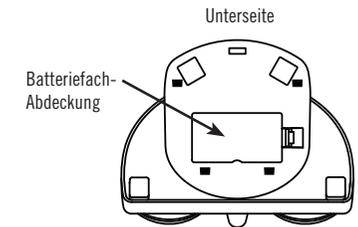

Unterseite  
Batterieabdeckung

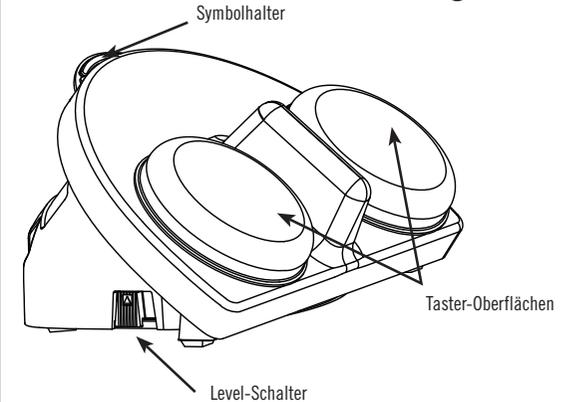

Obere Seite  
Symbolhalter

Taster-Oberflächen  
Level-Schalter

### Hinweise zur Garantie/Reparatur/Rücksendung

AbleNet bietet eine einjährige beschränkte Garantie für das iTalk2 Kommunikationshilfeprodukt. Ausführliche Garantieinformationen finden Sie auf unserer Website unter [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)

### Für weitere Informationen zu AbleNet Produkten und Dienstleistungen wenden Sie sich bitte an:

AbleNet, Inc.,  
Minneapolis/St. Paul, MN  
800-322-0956 (USA und Kanada)  
Internet: [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)

© 2008 AbleNet, Inc. Alle Rechte vorbehalten.