



Nachricht wiedergeben

1. Schalten Sie den LITTLE Step-by-Step durch Drehen des Lautstärkereglers ein.
2. Drücken Sie die große Tastfläche um die Nachricht Stück für Stück abzurufen.
3. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.

Aufnahme

1. Schalten Sie den LITTLE Step-by-Step durch Drehen des Lautstärkereglers ein.
2. Drücken Sie den kleinen Aufnahmeknopf (RECORD) bis die Kontroll-LED rot leuchtet, der Aufnahmemodus ist eingeschaltet.
3. Lassen Sie den Aufnahmeknopf los.
4. Drücken Sie die große Tastfläche und sprechen Sie das erste Stück der Nachricht auf, "Auf die Plätze". Halten Sie die große Tastfläche solange Sie sprechen, die Kontroll-LED blinkt während der Aufnahme.
5. Lassen Sie die große Tastfläche los.
6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 für alle weiteren Stücke der Nachricht. "Fertig"; "Los" ...
Sie können beliebig viele Stücke aufnehmen, insgesamt max. 75 Sekunden.
Hinweis: Wenn bei einem Nachrichtenteil der Schaltausgang aktiviert sein soll, drücken Sie zusätzliche die RECORD-Taste.
7. Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie den Aufnahmeknopf, die Kontroll-LED verlischt.



Der LITTLE Step-by-Step ist eine einfach zu bedienende Kommunikationshilfe.

Es kann eine Nachricht mit einer Länge von maximal 75 Sekunden in beliebig vielen Teilen gespeichert werden.

Batterie einsetzen

Der LITTLE Step-byStep benötigt eine 9V-Blockbatterie. Eine vorhandene Aufnahme bleibt auch beim Wechsel der Batterie erhalten.

1. Schalten Sie den LITTLE Step-by-Step mit dem Lautstärkereger aus.
2. Legen Sie den LITTLE Step-by-Step so, das die Unterseite und somit das Batteriefach zu Ihnen zeigt.
3. Entfernen Sie wenn vorhanden die Montageplatte.
4. Drücken Sie die Sperrlasche des Batteriefachdeckels vorsichtig zusammen und heben Sie gleichzeitig den Deckel hoch.



5. Nehmen Sie die alte Batterie aus dem Fach.
6. Ziehen Sie die Kontaktlasche von der Batterie ab. Achten Sie bitte darauf, die Kabel nicht zu beschädigen oder abzureißen.
7. Nehmen Sie eine neue Batterie und drücken Sie die Kontaktlasche in richtiger Polung fest auf die Batteriekontakte.
8. Legen Sie die Batterie in das Batteriefach. Achten Sie darauf, dass die Drähte unter der Batterie liegen und nicht geknickt werden.
9. Schieben Sie die beiden Laschen des Batteriefachdeckels in die Gehäuseaussparungen und schließen Sie den Batteriefachdeckel bis er hörbar einrastet. Wenden Sie keine Gewalt an. Kontrollieren Sie ggf. nochmals die Lage der Anschlussdrähte.



Nachricht Aufnehmen

1. Drehen Sie den LITTLE Step-by-Step so, dass Ihnen die Rückseite zugewandt ist. Sie sollten die große Tastfläche und den kleinen Aufnahmeknopf bequem erreichen können. Das Mikrofon für die Aufzeichnung befindet sich hinter der Lautsprecherverkleidung.
2. Schalten Sie den LITTLE Step-by-Step durch Drehen des Lautstärkereglers ein. Die Position des Drehrades hat keinen Einfluss auf die Lautstärke der Aufnahme.
3. Drücken Sie den Aufnahmeknopf (RECORD) solange, bis die Kontroll-LED rot leuchtet. Der LITTLE Step-by-Step befindet sich jetzt im Aufnahmehodus.
4. Drücken Sie die große Tastfläche und sprechen Sie das erste Stück der Nachricht auf, z.B. "Auf die Plätze". Halten Sie die große Tastfläche solange Sie sprechen gedrückt, die Kontroll-LED blinkt während der Aufnahme.
5. Lassen Sie die große Tastfläche los.
6. Wiederholen Sie Schritt 4 so oft, bis alle Teile der Nachricht aufgenommen sind.
7. Zum Beenden der kompletten Aufnahme drücken Sie den Aufnahmeknopf (RECORD) kurz, die Kontroll-LED verlischt.

Nehmen Sie die Nachricht in einer möglichst ruhigen Umgebung auf. Variieren Sie bei Bedarf den Abstand zum Mikrofon und die Lautstärke Ihrer Stimme. Falls Sie einen externen Taster/Sensor zur Hand haben, können Sie diesen als Ersatz für die Bedienung der großen Tastfläche bei der Aufnahme nutzen. Sie können damit die "Klacks" in der Aufnahme vermeiden.

Nehmen Sie alle Teile einer Nachricht in einem Aufnahmevorgang auf. Das Ersetzen einzelner Teile der Nachricht ist nicht möglich.

Nachricht wiedergeben

Zur Wiedergabe drücken Sie auf die große Tastfläche. Die Nachricht wird Stück für Stück wiedergegeben.

Die Lautstärke der Wiedergabe wird über den Lautstärke-Regler eingestellt.

Abdeckkappe

Mit der transparenten Abdeckkappe (Bestellnummer 40209) können zum symbolisieren der gespeicherten Nachricht Bilder oder Symbole auf der Tastfläche des LITTLE Step-by-Step fixiert werden.

Ziehen Sie dazu die Abdeckkappe ab, legen Sie ein Symbol/ Bild auf die Tastfläche und drücken die Abdeckkappe anschließend wieder fest auf die Taste.



Externe Taster/Sensoren

Auf der Rückseite des LITTLE Step-by-Step befinden sich zwei 3,5mm Klinkenbuchsen. Die mit „SWITCH“ bezeichnete Buchse direkt neben dem Lautstärkereglers dient dem Anschluss eines externen Tasters. Es können alle Einzeltaster/ Sensoren aus dem

Sortiment verwendet werden. Der externe Taster entspricht in der Funktion der LITTLE Step-by-Step -Tastfläche.

Andere Geräte anschließen

Der LITTLE Step-by-Step kann auch zur Steuerung eines adaptierten Spielzeugs oder eines Netzschaltadapters (z.B. PowerLink) eingesetzt werden.

Stecken Sie das mitgelieferte Steuerkabel in die mit „TOY/APPL“ bezeichneten Buchse auf der Rückseite des LITTLE Step-by-Step. Ein daran angeschlossenes externes Gerät wird während der Wiedergabe aktiviert.

ACHTUNG: Für die Teile der Nachricht, welche das externe Gerät aktivieren sollen, muss bei der Aufnahme der Aufnahme-Knopf (RECORD) gedrückt gehalten werden.

Beispiel: - "Auf die Plätze"

- "Fertig"

- "Los" - drücken Sie während der Aufnahme den Aufnahme-Knopf

(RECORD) um mit diesem Teil der Nachricht das externe Gerät z.B. Rundumleuchte, Hupe zu aktivieren

- "Schneller..."

Befestigung

Der LITTLE Step-by-Step besitzt eine leicht abnehmbare Montageplatte. Zum Entfernen drücken Sie auf die Verschlusslasche und ziehen Sie die Montageplatte in Richtung des Lautstärkereglers. Nehmen Sie die Montageplatte nach oben ab.

Mithilfe des beiliegenden Verbinders und der Montageplatte können Sie zwei LITTLE Step-by-Step miteinander verbinden.

In der abnehmbaren Montageplatte des LITTLE Step-by-Step sind 3 Bohrungen zur Befestigung vorgesehen. Mit ihr lässt sich der LITTLE Step-by-Step stabil und sicher an einer Halterung wie z.B. dem FrictionArm befestigen.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Als schnelle und flexible Befestigung auf dem Tisch bieten sich die Sensitrac-Halterungen an.



Der LITTLE Step-by-Step ist ein Produkt von AbleNet, Inc., Minneapolis, USA

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden die durch die Verwendung des Produktes oder der Anleutung entstehen.